

KIN ORO krem do protez Super Mocny 40 ml



Wskazania do stosowania

- Mocne, bezpieczne i trwałe mocowanie protezy.

Zalety

- Mocny, bezpieczny, długotrwały
- Neutralny smak
- Nie zawiera cynku
- Bezpieczny dla protez
- Niebarwiący
- Odporny na spożywanie gorących potraw i napojów
- Nie zawiera glutenu

Sposób użycia

- Na wewnętrznej stronie czystej i suchej protezy rozprowadź krem w trzech lub czterech punktach, unikaj pokrycia krawędzi.
- Włóż protezę w usta, popraw przyczepność naciskając mocno przez kilka sekund.
- Oczekaj kilka minut przed jedzeniem i pić.
- Przyczepność może trwać do 12 godzin, w zależności od spożywanych pokarmów i napojów.
- Proteza może być łatwo usunięta gdy jest taka potrzeba.
- Podczas pierwszego użycia zacznij od przytwierdzenia protezy przez zastosowanie niewielkiej ilości kremu, którą można stopniowo zwiększać w ciągu kolejnych kilku dni.

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Opakowanie

- krem 40 ml