

KIN aspirator do nosa dla dzieci



Wskazania do stosowania

- Przeziębienie, zapalenie zatok
- Przekrwienie błony śluzowej nosa
- Kiedy katar przeszkadza w oddychaniu i utrudnia przyjmowanie pokarmów

Zalety

- Bezpiecznie, higienicznie i bezpośrednio eliminuje nadmiar wydzieliny z nosa
- Delikatnie i bez podrażnienia nosa usuwa wydzielinę
- Posiada miękkie silikonowe końcówki w anatomicznym kształcie
- Posiada wymienne wkłady
- Proste zastosowanie, nie stwarza żadnego ryzyka dla dziecka

Sposób użycia

- Położyć dziecko na plecach.
- Umieścić końcówkę aplikatora w otworze nosowym i zassać delikatnie ustami.
- Chłonne filtry zatrzymują wydzielinę i zapobiegają jej przedostaniu się do rurki aspiratora.
- Powtórzyć czynność w drugim otworze nosowym.
- Wyjąć wkład. Umyć aspirator ciepłą wodą z dodatkiem np. mydła.
- W celu zwiększenia płynności śluzu, przed zastosowaniem można przepłukać nos roztworem soli fizjologicznej.

Przeciwwskazania

- Brak przeciwwskazań

Dodatkowe wkłady do aspiratora do nosa są dostępne w opakowaniach po 10 sztuk pod nazwą: KIN wkłady do aspiratora dla dzieci, 10 szt.

